

Information

新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記検査項目の受託を開始することになりました。取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

新規受託項目

- ◆新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）検査

受託開始日

- ◆2020年12月9日より受託開始

検査項目	検体 必要量	容器 保存方法	検査方法	基準値	所要日数
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）検査	唾液 1.5ml	専用容器 冷蔵 4℃～8℃	LAMP法	陰性	2～5日



検体採取説明書

1



唾液検体採取の30分前より、可能な限り飲食・歯磨き・うがいは避けてください。

2



唾液採取セット（ストロー入）と、ご自身のバーコードラベルであることを確認してください。

3



袋を切り込みに沿って開封してください。



試験管のキャップを開け、ストローを取り出してください。



口腔内に唾液を貯め、ストローを使って試験管に注入してください。コロナ検査に必要な唾液量は1mlから2mlです、試験管下部の目盛り1.5mlまで出してください。



規定量の唾液を出したら、二次感染を防ぐため使用したストローはそのまま試験管に戻して、キャップを最後までしっかり締め、絶対漏れないようにしてください。

※キャップがゆるんで、中身が漏れている場合は検査できません。

4



キャップがしっかり閉まっていることを確認し、バーコードラベルを容器に貼ってください。

5



検体を所定の検体立てに提出してください。

6

全員分の提出を確認し、吸水シートで検体立ての検体全体を覆ってください。

7

吸水シートで包んだ検体立てをビニール袋で梱包してください。（2次梱包）

8

2次梱包したものを保冷剤入りの搬送ボックスと一緒にに入れてください。（3次梱包）

**検体採取完了となります。
手洗い・消毒をお願いします。**

株式会社 日本医科学研究所

お問い合わせ

TEL 048-544-1811 FAX 048-544-1822

〒365-0039 埼玉県鴻巣市1丁目1番25 フラワービル4階